


SARSコロナウイルス抗原キット
インフルエンザウイルスキット

GLINE-SARS-CoV-2& FluA+Bキット

新型コロナウイルス抗原検査とA型/B型インフルエンザ抗原検査を同時に実施できる簡易キットです。

鼻腔ぬぐい液または鼻咽頭ぬぐい液で検査ができます。

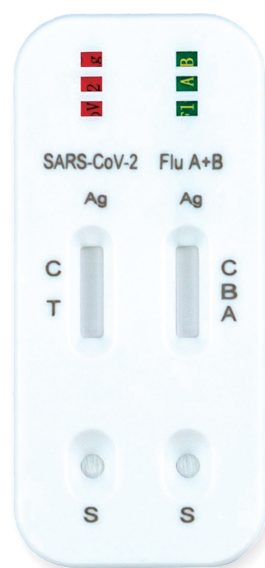


Point ①

2つの検査を同時にできる！

1回の検体採取でSARS-CoV-2とインフルエンザウイルスの検査を同時に実施できます。

Point ②

抽出液入りチューブでそのまま滴下できる！

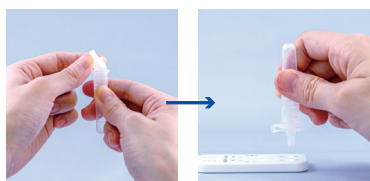

Point ③

オミクロン株を含む変異株に対応！

対応株については裏面の「GLINE-SARS-CoV-2&FluA+Bキットの使用法」QRコードよりご確認ください。




検査の流れ

- ① 添付文書および説明書（操作ガイド等）を必ず読んでから使用してください。



添付文書の入手方法、説明書（操作ガイド・動画）は「GLINE-SARS-CoV-2&FluA+Bキットの使用法」QRコードよりご確認ください。

- ② 検体を採取します。
【鼻腔ぬぐい液の場合】
付属のスワブで左右の鼻腔から検体を採取します。

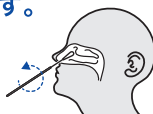

- 【鼻咽頭ぬぐい液の場合】
市販の鼻咽頭ぬぐい液採取用のスワブを使用し、鼻咽頭から検体を採取します。



- ③ 採取したスワブをチューブに入れ、検体を抽出したのち、反応カセットの滴下部2か所にそれぞれ3滴滴下します。



- ④ 15分後（20分まで）に結果が分かります。



※20分以上経過すると正しい判定ができません。

※上記の手順・イラストは、検査の流れを簡略化して示したものです。実際の操作は添付文書および説明書（操作ガイド等）に従い実施してください。

GLINE-SARS-CoV-2&FluA+Bキットの使用法



GLINE-SARS-CoV-2&FluA+Bキットをご使用される前に必ずご覧ください。

https://ivd.mbl.co.jp/diagnostics/products/infection/GLINE-SARS-CoV-2_Flu.html

キット情報

製品名	GLINE-SARS-CoV-2&FluA+Bキット
Code No.	DG80008
承認番号	30400EZ00067000
測定原理	金コロイドを発色原理としたイムノクロマト法
貯蔵方法	2～30℃
検体	鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
判定時間	15～20分
包装単位	5テスト
使用目的	鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のSARS-CoV-2抗原、A型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出（SARS-CoV-2感染又はインフルエンザウイルス感染の診断補助）

構成品	数量
反応カセット（個包装）	5個
抽出液入りチューブ	5本
付属品	数量
鼻腔スワブ	5本

※本キットの付属品には鼻咽頭スワブは含まれていません。
鼻咽頭ぬぐい液で検査をする場合には、別途市販品の鼻咽頭スワブをご用意ください。

【カタログ作成年月：2022年9月】 【情報有効期限：2022年9月～2023年3月末 又は 改訂版を発行するまで】 【最新の情報は当社までお問い合わせください。
【情報有効期限の過ぎたPDFファイルは消去してください。】 【本PDF、掲載情報の転送、複製、転載はお控えください。】 【ご使用の際には、添付文書をよくお読みください。】